

# Schnelldesinfektion Includal® Antisept



## Einsatzbereich

Desinfektion von Flächen und Gegenständen

## Eigenschaften

- schnell und rückstandsfrei trocknendes Flächendesinfektionsmittel mit antibakterieller und antimykotischer Wirkung
- begrenzt viruzid PLUS gemäß RKI-Empfehlung (inkl. Corona-, Influenza- und Vaccinia-Viren sowie BVDV, HBV, HCV, HIV)
- bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid
- levurozid
- parfümfrei
- VAH- und ÖGHMP-gelistet
- IHO-gelistet
- HACCP-konform



KRIEMHILDSTR. 7 · 4300 ST. VALENTIN  
TEL. 07436/64700 · FAX. 04736/6470064  
MAIL: OFFICE@IBACARE.EU  
WWW.IBACARE.EU



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Wirksamkeit und Prüfmethode

Bakterien und Hefen	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid	VAH/EN 16615	Mit Mechanik, hohe Belastung	5 Minuten
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid	VAH/EN 13697	Ohne Mechanik, hohe Belastung	5 Minuten
Mykobakterizid (M.avium und M.terrae)	EN 14348	Niedrige Belastung	1 Minute
Tuberkulozid (M.terrae)	EN 14348	Niedrige Belastung	30 Sekunden

Viren	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
Begrenzt viruzid	RKI/DVV	Inkl. HBV/HIV/HCV	30 Sekunden
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	Niedrige Belastung	3 Minuten
Wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	Niedrige Belastung	30 Sekunden
Wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	Niedrige Belastung	3 Minuten
Wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	Niedrige Belastung	1 Minute

### Anwendungsgebiete:

INCLUDAL® ANTISEPT ist ein Desinfektionsmittel für Flächen und Gegenstände mit antibakterieller und antimykotischer Wirkung. Ein feiner Sprühnebel legt sich auf die zu desinfizierenden Gegenstände, der eine gleichmäßige Verteilung der Wirkstofflösung bis in schwer zugängliche Ecken, Einbuchtungen und Falten ermöglicht. INCLUDAL® ANTISEPT verhält sich gegenüber alkoholbeständigen Materialien und Gegenständen völlig indifferent, trocknet rasch und hinterlässt auf den behandelten Stellen keine Rückstände. INCLUDAL® ANTISEPT verfügt über eine gute Wirksamkeit gegenüber Bakterien und Viren, insbesondere in Umkleide- und Behandlungsräumen. Beispiele: Toiletten, Türgriffe, Telefonhörer, Spinde, Schutzmasken. Gelistet: VAH (Verbund für Angewandte Hygiene), ÖGHMP (Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin), IHO (Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz), HACCP-konform.

### Wirkungsspektrum:

INCLUDAL® ANTISEPT wirkt: bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, fungizid (C. albicans), levurozid, begrenzt viruzid PLUS gemäß RKI/DVV (inkl. Corona-, Influenza- und Vaccinia-Viren sowie BVDV, HBV, HCV, HIV)

### Anwendung/Anwendungshinweise:

Gegenstände und Flächen aus mindestens 30 cm Entfernung bis zur vollständigen Benetzung besprühen und ggf. nach Ablauf der Einwirkzeit mit einem Einmaltuch nachwischen. Nichtklimatisierte Räume nach Desinfektion lüften. Für Acrylglas und andere alkoholempfindliche Flächen, Lacke, geölte Holzflächen, etc. nicht einsetzbar. Bei empfindlichen Flächen ggf. Beständigkeitsprobe an unauffälliger Stelle vornehmen.

### Produktbeschreibung:

Klare, farblose, alkoholische (ca. 45 %) Lösung, parfümfrei.

### Zusammensetzung:

100 g INCLUDAL® ANTISEPT enthalten 45,0 g Ethanol.

### Hinweise zur Handhabung:

INCLUDAL® ANTISEPT sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Nur zur professionellen Anwendung.



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

#### Lagerungshinweise:

INCLUDAL® ANTISEPT ist in originalverschlossenen Gebinden bei Raumtemperatur lagerfähig. Das jeweilige Haltbarkeitsdatum ist auf der Verpackung angegeben.

#### Gesetzliche Vorschriften:

INCLUDAL® ANTISEPT ist ein Biozid gemäß der Biozid-Verordnung (EU) Nr. 528/2012.

BAuA Reg.-Nr.: N-44075; N-44076

Reg.-Nr. NO: 650566

Ein EG-Sicherheitsdatenblatt liegt vor und kann unter [www.myxal.de](http://www.myxal.de) heruntergeladen werden.

#### Umwelt:

Die Flaschen sind aus PE gefertigt und können nach vollständiger Entleerung als PE-Abfall entsorgt werden.

#### Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien:

**Achtung:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KON-TAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelasenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

#### Bestelldaten INCLUDAL® ANTISEPT:

250-ml-Sprühflasche

BSW-Nr.: 13785001

PZN 3854240

10 x 250-ml-Sprühflasche = 1 VE<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> VE = Verpackungseinheit



Unsere Angaben und Empfehlungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Erkenntnisse. Wir erteilen sie unverbindlich. Sie stellen weder eine Garantie dar noch wird hierdurch ein Vertragsverhältnis begründet. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der Produktweiterentwicklung behalten wir uns vor. Wir bitten Sie, die Produkte stets selbst auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. **Stand: 01/2023**

Peter Greven Physioderm GmbH | Procter-&-Gamble-Straße 26 | 53881 Euskirchen | Germany  
Tel.: +49 (0)2251 77617-0 | Fax: +49 (0)2251 77617- 44 | [info@pgp-hautschutz.de](mailto:info@pgp-hautschutz.de) | [www.myxal.de](http://www.myxal.de)



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.